



Moldes sueño



SNR
20 dB

Nota: El sonido también se percibe en el cuerpo a través de la nariz, la boca y los huesos (conducción ósea), esto hace que ciertos sonidos sigan siendo audibles.



Nota: Los moldes de protección para el baño no deben utilizarse para bucear.

MANUAL DE USUARIO

Moldes personalizados


IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones y conserve este manual de usuario.

Producto: Este producto es único y se ha fabricado a medida con la impresión recibida. Cada molde esta identificado con un número de serie

Uso: Compruebe que los moldes estén limpios. Los moldes van identificado con una letra L izquierdo R para el derecho, al final de cada número de serie o bien con un punto azul (izquierdo), rojo (derecho).

Colocación: La primera vez que utilice los moldes y tenga dificultad para colocarlos, puede utilizar la crema Otoferm o similar.

Fabricados por: Lab.Sonora S.L B54357579

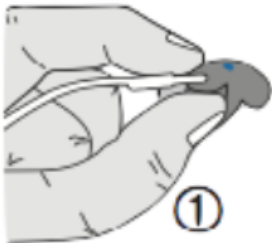

Moldes personalizados

COMO COLOCAR Y EXTRAER: Girando hacia delante paso 2 ,una vez colocado gire hacia atrás paso 3 presione para comprobar que esta bien colocado.

Para extraerlo (**secar con una toalla antes de retirar los moldes de baño**) girando hacia delante o bien presionando con el dedo índice en la parte baja del oído deslizando hacia arriba.

Una vez extraídos limpiar con un paño húmedo y colocar en el estuche.

MANTENIMIENTO DE LOS MOLDES: Periódicamente se ha de realizar una limpieza más profunda, les aconsejamos utilizar productos de limpieza adecuados.

Advertencia: El uso de productos químicos agresivos puede dañar el molde.

La pérdida de peso corporal puede provocar un mal ajuste del molde en el canal auditivo.

Sustituya los moldes de protección en un periodo no superior a cuatro años.

